

NFC 接続が可能な血糖測定器

グルテストアイ (GT-1840)



対応するスマートフォン


- ・ iOS: 13 以降を搭載したスマートフォン

NFC (Felica)リーダを搭載している機種。iPhone7 以降で対応。



※スマート e-SMBG : Ver.1.1.56 以降のバージョンとなります

通信タイプを設定

1. グルテストアイの右側面のカバーを開きます。

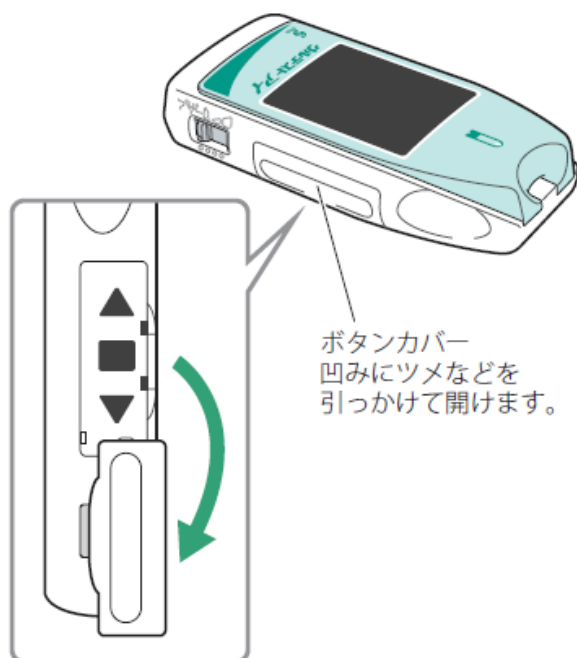

2. 電源が切れている状態で、■ボタンを 5 秒間押して、メニューを表示します。通信設定→Type B を選択し、登録します。

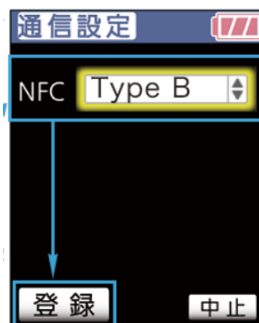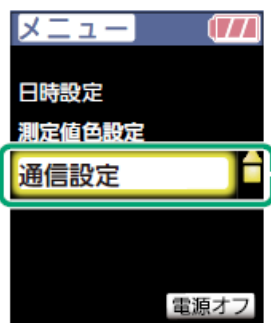

アプリでの操作

3. スマート e-SMBG 画面右下の設定→血糖測定器との NFC 接続を選択します。

“開始する”を選択すると、“スキンの準備ができました”と表示されます。



4. NFC 部分をスマートフォンにかざします。



5. 自動的に未登録データの取り込みが始まります。

データ通信中は、血糖自己測定器とスマートフォンを離さないでください

この画面が表示されたら、血糖自己測定器とスマートフォンを離してください。



6. データの取り込みが終了すると、読み取り結果画面が表示されます。

登録を選択すると取り込んだデータがスマート e-SMBG に登録されます

読み取った血糖値右部分にあるりんごマークを選択すると、測定タイミングを変更できます。



以上