



❗この画面が出たら
位置情報の設定が「OFF」の
場合は「ON」に変更します。

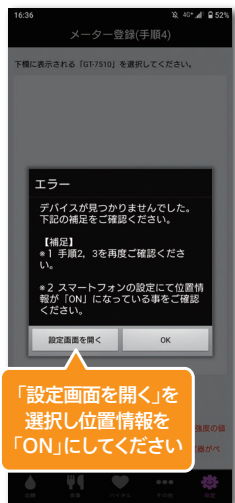


「設定画面を開く」を
選択し位置情報を
「ON」にしてください

10

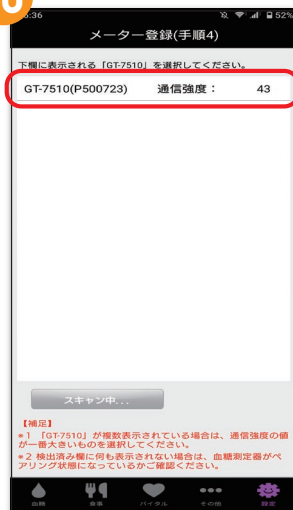


GT-7510を選択します。

11

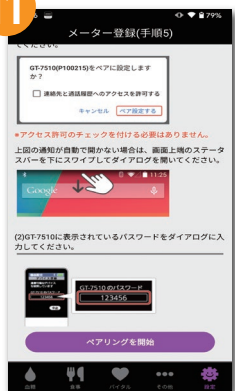

画面に表示されている
方法に従い「ペアリング
を開始」を選択します。

12

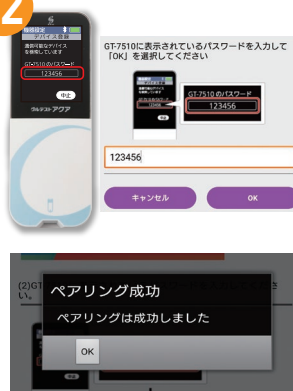

メーター画面に表示された
パスワードを入力し「OK」
ボタンを選択すると、設定が
完了します。

これで設定は完了です。

測定後センサーを廃棄すると自動的にデータが
Androidに転送されます。

グルテストアクアと通信



測定終了

①センサーを抜く

②Bluetoothで通信

Bluetooth接続の条件

GT-7510のBluetooth(LE)通信対応のスマートデバイスは以下の通りです。

対象機種: Android5.0以降の機種

通信方式: Bluetooth ※Androidの機種により通信できない場合があります。

❗これらの条件を満たしていない場合はケーブルでスマートフォンと
測定器を接続することでデータの自動取込が可能です。

AndroidはVer.5.0以降でも機種によっては通信できない場合や通信が不安定
になる場合がありますので、予めご了承ください。

お問い合わせ

下記メールアドレスか、スマートe-SMBG公式Facebookページまで
お問い合わせください。

e-mail: arkrayandroid+m@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/esmbgTools

※外観や仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

製品の取扱いに関するお問い合わせは、三和化学研究所へ

フリーダイヤル

ハイサンワ



0120-07-8130

お問い合わせは365日24時間お受けいたします。

本アプリは無料です。ただし、アプリのダウンロード、バージョンアップ、サービス利用には
パケット通信料がかかります。パケット通信料金は携帯電話会社にご相談ください。
血糖測定器は添付文書、取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく使用してください。

[2021.3作成] GAQ-31 A01015

自己検査用グルコース測定器

グルテストアクアの
Bluetooth接続方法


Android版

使い方ガイド



グルテスト アクアとAndroidの接続を試みよう

! モバイル端末のBluetoothの設定はしましたか？

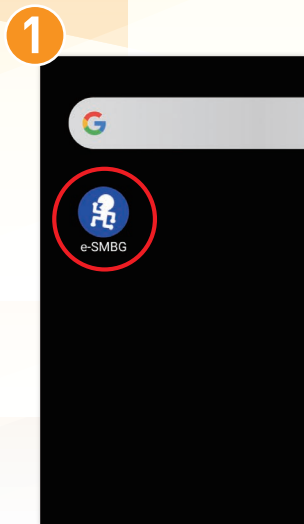

スマート e-SMBGを
起動します。




画面右下の「設定」を
選択します。



メニューの
「Bluetoothデータ受信設定」
を選択します。




「Bluetooth設定」を
選択します。

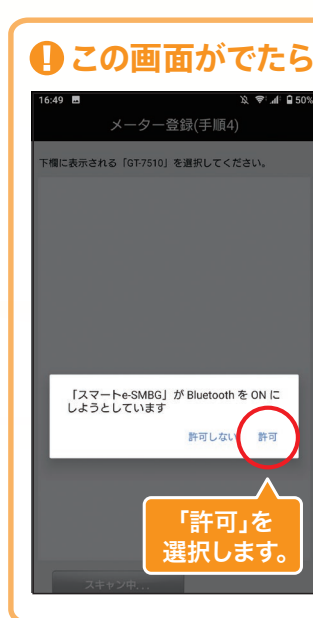


「許可」を
選択します。



「メーター登録」を
選択します。

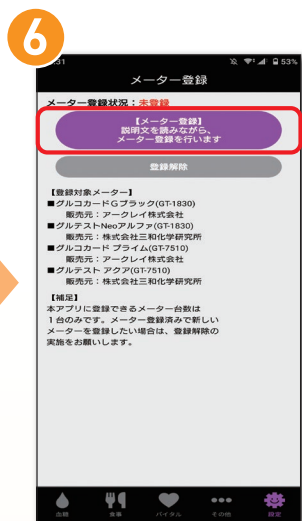

「メーター登録」を
選択します。

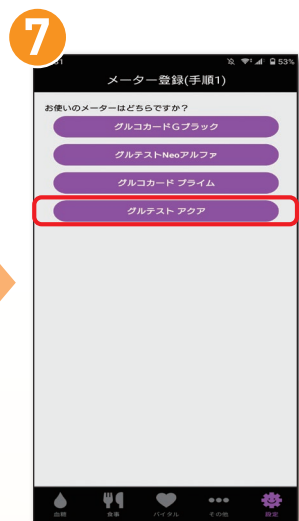

「グルテスト アクア」を
選択します。

※「グルテスト アクア」が表示され
ない場合はアプリが最新ではない可
能性があります。
Google Playストアよりアプリをバー
ジョンアップしてください。



Bluetooth設定を「ON」にします。
設定完了後、「手順3へ進む」を
選択します。



さらに説明文が表示されます。
画面に表示されている方法に従い
測定器の設定を行います。
設定が終わったら
「手順4へ進む」を選択します。

① メーターの設定

(1)メーターの操作ボタンに
ある「■」ボタンを5秒以上長押
して電源をONにし、「設定
画面」を表示させます。




「Bluetooth設定」
を選択します。



「通信」設定で
「自動」を選択します。



「測定後自動送信」
設定で「ON」を選択
します。

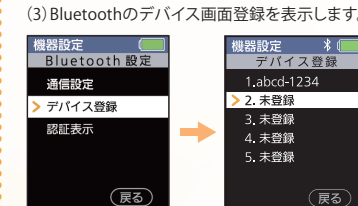

「デバイス登録」を
選択します。

デバイス登録をする
番号を選択します。

裏面へ続く▶▶▶