

グルテストアクアと通信



Bluetooth 接続の条件

グルテストアクアのBluetooth(LE)通信対応の機種は以下の通りです。

対象機種 Android5.0以降の機種

通信方式 Bluetooth
※Androidの機種により通信できない場合があります。

! これらの条件を満たしていない場合はケーブルでスマートフォンと測定器を接続することでデータの自動取込が可能です。

AndroidはVer.5.0以降でも機種によっては通信できない場合や通信が不安定になる場合がありますので、予めご了承ください。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、
welbyカスタマーサポートまでお問合せください。

☎ 0120-095-655

受付時間 平日10:00~17:30

@ support@welby.jp

●製品の取扱いに関するお問い合わせは、三和化学研究所へ●

フリーダイヤル ハイサンワ
☎ 0120-07-8130

お問い合わせは365日24時間お受けいたします。

本アプリは無料です。ただし、アプリのダウンロード、バージョンアップ、サービス利用にはパケット通信料がかかります。パケット通信料金は携帯電話会社にご相談ください。血糖測定器は添付文書、取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく使用してください。

[2021.6]作成
GAQ-33
A01049

データを通信してみよう



[welbyマイカルテ]の
タブバーにある
[機器連携]をタップします。

リストから
[三和化学研究所血糖測定器
グルテストアクアGT-7510]を
タップします。

[計測を開始してください]
の表示が出たら、
血糖測定を行ってください。

血糖測定を行った後、センサーを排出すると、
[通信中]の画面が表示されます。

[計測結果]の画面が表示され、
[登録する]をタップすると、
測定結果が登録されます。

welby マイカルテ

自己検査用グルコース測定器

グルテストアクアの
Bluetooth 接続方法

Android版

使い方ガイド



株式会社 三和化学研究所
SKK

連携を行う前に確認していただきたいこと


1



メータの操作ボタンにある「**■**」ボタンを5秒以上長押しして電源をONにし、「設定画面」を表示させます。

2

「グルテストアクア」の操作モードは「**高機能**」になっていますか。

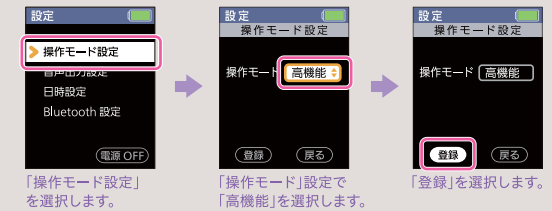


3

「グルテストアクア」の測定時間帯設定は「**自動**」になっていますか。



4

「グルテストアクア」の通信設定は「**自動**」、測定後自動送信が「**オン**」になっていますか。

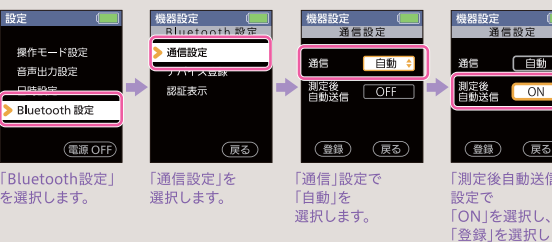

グルテストアクアとAndroidの接続を試みよう

1



[welbyマイカルテ]のタブバーにある「機器連携」をタップします。

2



リストから「三和化学研究所血糖測定器 グルテストアクアGT-7510」をタップします。


3



「ペアリング」画面が表示されたら、「ペアリングを開始する」をタップします。

グルテストアクアでデバイス登録を行います。

1 「機器設定」から「Bluetooth設定」を選択します。

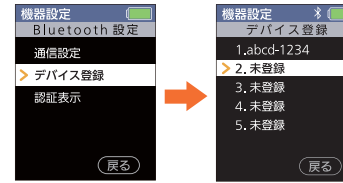


2 「デバイス登録」を選択します。


3 デバイス登録をする番号を選択します。

スマートフォンで必要な設定


Bluetooth 設定

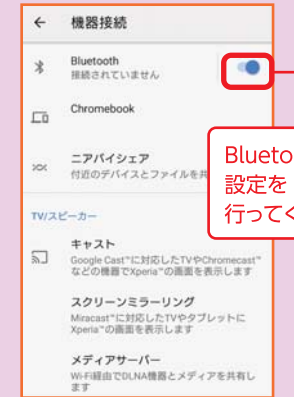

位置情報設定

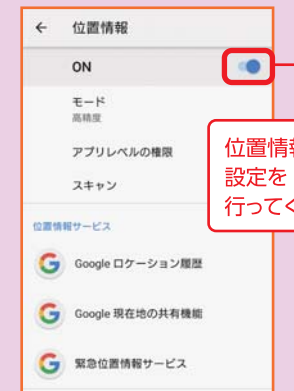

4

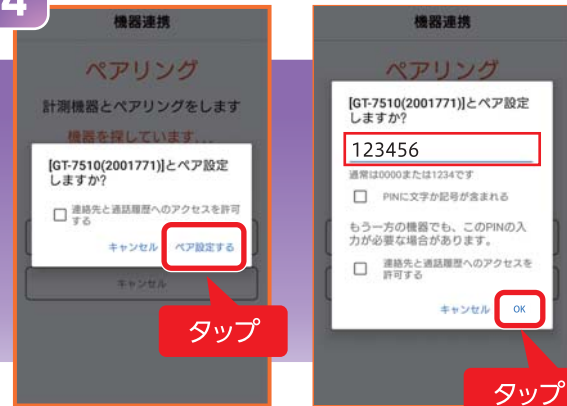

「GT-7510(シリアルNo)とペア設定しますか?」の画面が表示されたら、「ペア設定する」をタップします。

画面に血糖測定器のパスワードが表示されますので、表示されたパスワードを入力し「OK」をタップします

5



「計測を開始してください」の表示が出たらペアリング完了です。

【グルテストアクア】をはじめてご利用の場合の設定は以上で終了です。

データの通信方法は裏面をご覧ください。