

8



上記画面が表示されますので「OK」を選択します。

9



GT-7510を選択します。

10



測定器に表示されたパスワードを入力します。入力後に「ペアリング」を選択すると登録が完了します。

これで設定は完了です。

測定後センサーを廃棄すると自動的にデータがiPhoneに転送されます。

グルテストアクアと通信



Bluetooth接続の条件

GT-7510のBluetooth(LE)通信対応のスマートデバイスは以下の通りです。

対象機種: iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降、

iPad第3世代以降、iPad mini

通信方式: Bluetooth

お問い合わせ

下記メールアドレスか、スマートe-SMBG公式Facebookページまでお問い合わせください。

e-mail: arkrayandroid+m@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/esmbgTools

※外観や仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

製品の取扱いに関するお問い合わせは、三和化学研究所へ

フリーダイヤル **0120-07-8130** ハイサンワ

お問い合わせは365日24時間お受けいたします。

本アプリは無料です。ただし、アプリのダウンロード、バージョンアップ、サービス利用にはパケット通信料がかかります。パケット通信料金は携帯電話会社にご相談ください。血糖測定器は添付文書、取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく使用してください。

[2021.3作成] GAQ-30 A01014

自己検査用グルコース測定器

グルテストアクアの Bluetooth接続方法

iPhone版

使い方ガイド



グルテスト アクアとiPhoneの接続を試みよう

! モバイル端末のBluetoothの設定はしましたか？



アプリを立ち上げて、設定を選択します。




「血糖測定器とのBluetooth接続」を選択します。



「メーターのBluetooth設定」を選択します。


この画面がでたら

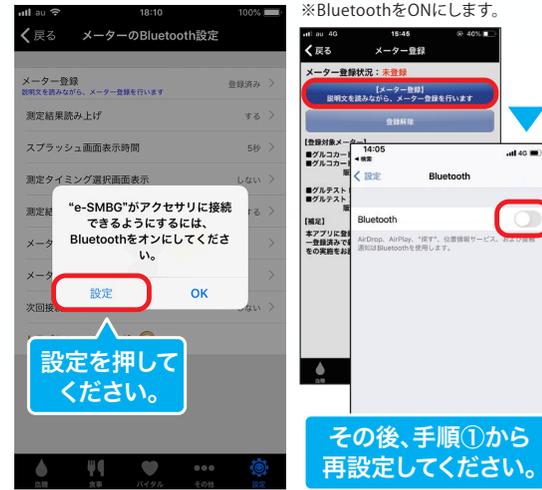

その後、手順①から再設定してください。



「メーター登録」を選択します。

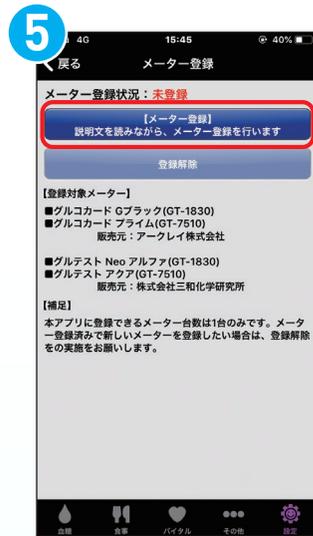

「メーター登録」を選択します。



「グルテスト アクア」を選択します。

※「グルテスト アクア」が表示されない場合はアプリが最新ではない可能性があります。AppStoreよりアプリをバージョンアップしてください。



画面に表示されている方法に従い設定を行います。設定が終わったら「手順2へ進む」を選択します。

メーターの設定

- メーターの操作ボタンにある「**■**」ボタンを5秒以上長押しして電源をONにし、「設定画面」を表示させます。
- Bluetooth通信の設定を有効にします。「高機能モード」選択されている場合は、「機器設定」>「Bluetooth設定」を選択してください。




「通信設定」を選択します。



「測定後自動送信」設定で「ON」を選択します。



「登録」を選択します。

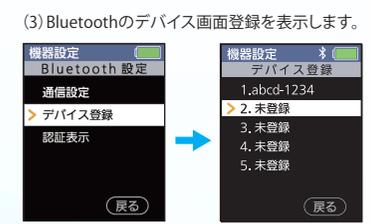

「デバイス登録」を選択します。

デバイス登録をする番号を選択します。

下へスクロール