

グルテストアクアと通信



Bluetooth 接続の条件

グルテストアクアのBluetooth(LE)通信対応の機種は以下の通りです。

対象機種 iPhone: iOS 9.0以降が必要です。
iPod touch: iOS 9.0以降が必要です。

通信方式 Bluetooth

お問合せ

ご不明な点がございましたら、
welbyカスタマーサポートまでお問合せください。

☎ 0120-095-655

受付時間 平日10:00～17:30

@ support@welby.jp

●製品の取扱いに関するお問い合わせは、三和化学研究所へ●

フリーダイヤル ハイサンワ
☎ 0120-07-8130

お問い合わせは365日24時間お受けいたします。

本アプリは無料です。ただし、アプリのダウンロード、バージョンアップ、サービス利用には
パケット通信料がかかります。パケット通信料金は携帯電話会社にご相談ください。血糖
測定器は添付文書、取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく使用してください。

[2021.6]作成
GAQ-32
A01048

データを通信してみよう



[welbyマイカルテ]の
タブバーにある
[機器連携]をタップします。

リストから
[三和化学研究所血糖測定器
グルテストアクアGT-7510]を
タップします。

[計測を開始してください]
の表示が出たら、
血糖測定を行ってください。



血糖測定を行った後、センサーを排出すると、
[通信中]の画面が表示されます。

[計測結果]の画面が表示され、
[登録する]をタップすると、
測定結果が登録されます。

welby マイカルテ

自己検査用グルコース測定器

グルテストアクアの
Bluetooth 接続方法

iPhone版

使い方ガイド



Bluetooth

株式会社 三和化学研究所
SKK

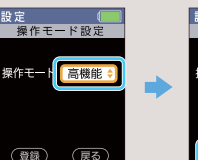
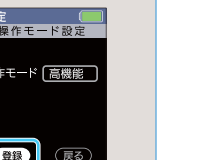
連携を行う前に確認していただきたいこと

1


メータの操作ボタンにある「」ボタンを5秒以上長押しして電源をONにし、「設定画面」を表示させます。

2

「グルテストアクア」の操作モードは「**高機能**」になっていますか。

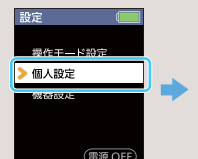
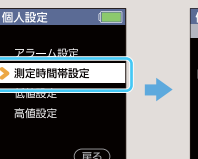
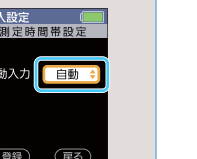
「操作モード設定」を選択します。

「操作モード」設定で「高機能」を選択します。

「登録」を選択します。

3

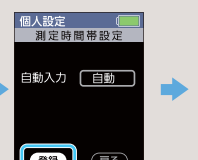
「グルテストアクア」の測定時間帯設定は「**自動**」になっていますか。

「個人設定」を選択します。

「測定時間帯設定」を選択します。

「自動入力」設定で「自動」を選択します。





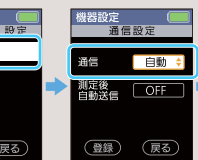
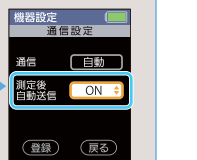
「登録」を選択します。

測定時間を設定します。

「登録」を選択します。

4

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
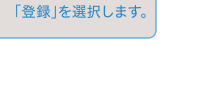
「グルテストアクア」の通信設定は「**自動**」、測定後自動送信が「**オン**」になっていますか。

「Bluetooth設定」を選択します。

「通信設定」を選択します。

「通信」設定で「自動」を選択します。

「測定後自動送信」設定で「ON」を選択し、「登録」を選択します。

グルテストアクアとiPhoneの接続を試みよう

1


「welbyマイカルテ」のタブバーにある「機器連携」をタップします。

2


リストから「三和化学研究所血糖測定器 グルテストアクアGT-7510」をタップします。

3

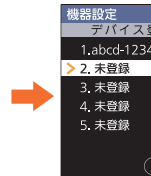

「ペアリング」画面が表示されたら、「ペアリングを開始する」をタップします。

グルテストアクアでデバイス登録を行います。

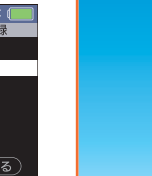
1 「機器設定」から「Bluetooth設定」を選択します。



2 「デバイス登録」を選択します。



3 デバイス登録をする番号を選択します。

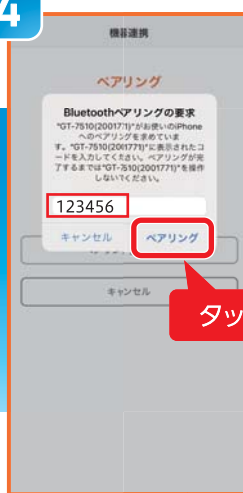


スマートフォンに必要な設定

Bluetooth 設定



Bluetoothの設定を行ってください

4


「Bluetoothペアリングの要求」の画面が表示されます。血糖測定器のパスワードが表示されますので、表示されたパスワードを入力し「ペアリング」をタップします。

5


「計測を開始してください」の表示が出たらペアリング完了です。

【グルテストアクア】をはじめてご利用の場合の設定は以上で終了です。

データの通信方法は裏面をご覧ください。